

Intégration au cabinet Guide de démarrage rapide

L'application AcceleDent fonctionne en se connectant à votre AcceleDent Optima™ via Bluetooth®. L'appariement ouvre de nombreuses possibilités pour monitorer le traitement de vos patients et améliorer les résultats cliniques.

1 Téléchargez



Pour installer l'application gratuite AcceleDent, suivez des simples étapes :

- **Android™** : cherchez l'application AcceleDent dans Android Market ou Google Play™ Store.
- **Apple®** : cherchez l'application AcceleDent dans l'Apple App Store®.

2 Enregistrement

Un compte AcceleDent App a été créé pour votre cabinet.

- Vous allez recevoir un mail de **customerservice@orthoaccel.com** dans votre boîte aux lettres. Merci de vérifier dans vos spams.
- **Confirmez** votre nouveau compte Myacceldent en cliquant sur le lien.
- Une fois que vous avez confirmé votre compte vous recevrez un second lien qui vous donnera accès à un écran pour choisir votre mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins : 6 lettres, 1 chiffre, 1 Symbole.
- Retournez sur MyAcceleDent.com. **Entrez** votre mail comme identifiant puis votre **mot de passe**. Merci d'utiliser l'adresse mail qui a été utilisée précédemment pour vous envoyer le lien. Vous avez configuré le compte de votre cabinet.



Ecran d'accueil

L'écran d'accueil pour les praticiens sera l'onglet **Historique d'Utilisation** avec la liste de tous les patients actifs accessibles. Vous pouvez chercher les patients par nom ou par son classement.


- Le classement de chaque patient est basé sur son niveau de compliance (% d'utilisation). Vert indique plus de 80% d'utilisation, Gris entre 60 et 80% et rouge moins de 60%.
- **Cliquez sur le nom d'un patient** pour voir son tableau de bord. Ils sont les mêmes pour tous les patients Optima. Ils vous aideront à monitorer de manière proactive vos traitements.



Menu

L'icône (Trois barres horizontales) vous indique le menu. L'icône sera toujours visible sur le côté gauche.


- Tapez sur le menu pour naviguer dans les différents écrans.
- Un **numéro en vert** accolé au menu **indique une notification**.

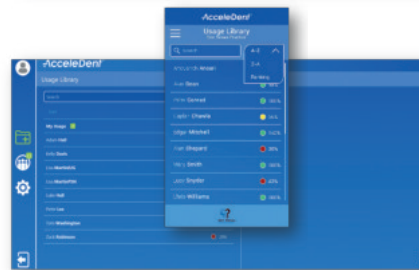

Un lien direct avec vos patients

Il a deux possibilités pour ajouter des patients :

1. Le cabinet peut **scanner les QR code** des boîtes en utilisant un téléphone mobile pour lier directement un appareil au cabinet.
2. Allez sur **Communauté** ou **Historique d'Utilisation**.
3. **Cliquez sur l'icône (+)** qui est dans le coin droit en haut et **choisissez QR code**.
4. Vous **trouverez le QR code** sur l'étiquette de chaque boîte et vous pourrez **le scanner**. Vous recevrez une notification sur le portail d'un scan réussi mais vous ne pourrez voir l'appareil.
5. Quand le patient enregistrera et reliera son appareil, le cabinet sera automatiquement connecté.

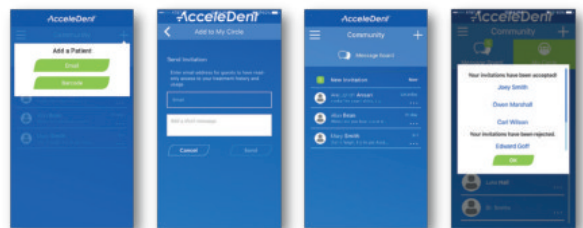

Note : Si un patient n'est encore enregistré, votre invitation attendra dans le système jusqu'à que le compte du patient soit enregistré.

2. Le praticien peut se connecter avec les patients par le portail web ou l'application en envoyant un lien.
3. Allez sur **Communauté** ou **Historique d'Utilisation**.
4. **Cliquez sur le (+) icône** sur le coin droit et **cliquez sur email**.
5. Remplissez le mail du patient et envoyez.
6. Vous recevrez une notification quand le patient ouvrira votre lien.

Informations Patient


Non seulement vous avez accès aux tableaux de bord de chaque patient mais aussi à ses données de base.

- L'icône **Information (i)** contient les informations de base mais aussi un lien vers **Consulter les messages** ou l'accès à **Archiver le patient**.
- Quand vous êtes sur l'écran Communauté, l'icône Information (i) vous donne accès à des données de base et un lien vers l'**historique d'utilisation** du patient.



Suivre les progrès de vos patients

- Si vous **cliquez sur le nom d'un patient** vous verrez son utilisation des 30 derniers jours.
- L'**utilisation globale** est une comparaison de l'utilisation d'AcceleDent Optima avec tous les utilisateurs au monde.
- Faites défiler vers le bas et vous aurez les possibilités de voir plus de données d'utilisation par session. Les jours d'utilisation correct, les jours sans utilisation, les temps d'utilisation trop longs ou trop courts des 30 derniers jours.
- Vert indique Correct, Orange trop long, rouge les sessions manquées.
- Le tableau de bord vous indiquera à quel moment de la journée votre patient utilise AcceleDent. Bleu clair indique le matin, Bleu le jour et noir la nuit.

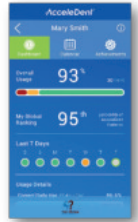

Calendrier d'utilisation patient


- En cliquant sur le **calendrier** vous visualiserez un mois complet.
- En choisissant un jour vous aurez tous les détails de l'utilisation par le patient pour cette journée.



Communauté Question Clinique

Envoyer des messages directement à vos patients est possible, vous pouvez les encourager, leurs rappeler des éléments du traitement et tous les points importants.

- Utilisez l'onglet **communauté** pour envoyer un message à un de vos patients. Pour le sélectionner « **tapez** » sur son nom et écrire votre message.
- N'hésitez pas à féliciter les patients compliants.
- Pour ceux qui oublient d'utiliser AcceleDent, envoyez des messages d'encouragement par la messagerie de l'Application.
- Les patients peuvent aussi communiquer avec votre cabinet et se sentir plus « soutenus » dans leurs efforts entre deux rendez-vous.

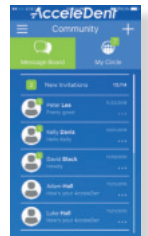

Support

Dans le menu support, vous trouverez des **informations utiles** sur votre **identifiant de compte**, sur AcceleDent, **ou Comment envoyer une notification** ainsi que des **Vidéos et des instructions d'utilisations**. Vous pourrez choisir aussi les **différentes langues et zones horaires**.

