

## Guida rapida per l'integrazione nello studio medico della App

La App AcceleDent lavora attraverso la connessione Bluetooth® con il vostro dispositivo AcceleDent Optima™. L'abbinamento consente di ottenere grandi funzionalità per monitorare il trattamento dei vostri pazienti e ottimizzare i risultati clinici.

### 1 Download

Per installare l'App gratuita AcceleDent, seguite i semplici passaggi riportati di seguito.



- **Dispositivi Android™:** Cercate l'App AcceleDent nell'Android Market o in Google Play™ Store.
- **Dispositivi Apple®:** Cercate l'App AcceleDent nell'Apple Store®.

### 2 Registrazione

L'account per la App AcceleDent legata al vostro studio medico è stata già creata per voi.


- Riceverete una mail inviata da [customerservice@orthoaccel.com](mailto:customerservice@orthoaccel.com) nella vostra posta in arrivo. Per favore controllate anche nello spam e nella posta indesiderata.
- **Per favore confermate** il vostro Nuovo account AcceleDent cliccando sul link.
- Il reset della password deve contenere le seguenti caratteristiche per poi essere confermato: 6 lettere, 1 numero, 1 carattere speciale.
- Tornate su MyAcceleDent.com. **Digitate la vostra email** come User ID e poi la **Password**. Per favore utilizzate l'indirizzo mail al quale era stata inviata la mail di conferma. A questo punto avrete effettuato il Setup per l'accesso al vostro Account come studio medico.



### Schermata Home

La schermata home per gli studi medici sarà la Library con tutti i vostri **Pazienti Attivi** visibili. I pazienti si potranno cercare ed elencare con il nome o con il loro ranking.

- Il ranking è dato dalla compliance di ogni singolo paziente. Verde indica "compliance superiore all'80%", grigio indica "compliance tra il 60 e l'80%", e rosso indica "compliance sotto il 60%".
- **Cliccate sul nome del paziente** per vedere il suo dashboard. Questo consente la gestione proattiva di tutti i vostri casi, con un colpo d'occhio su tutti i vostri pazienti in trattamento con AcceleDent Optima.

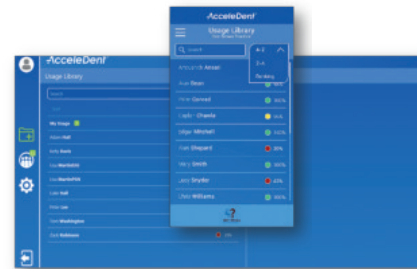

### Menu

Le tre icone in orizzontale nella app indicano il Menu. Il Menu sarà sempre visibile sul portale web sulla parte sinistra.


- Cliccate sul Menu per navigare tra le varie schermate.
- Un **numero verde** vicino al Menu **indica la presenza di notifiche**.



### Un link diretto ai vostri pazienti

Ci sono due modi per aggiungere i pazienti:

1. Il medico può **scansionare** i **QR code** presenti sulla **confezione** utilizzando la App scaricata sullo smartphone per connettere direttamente il dispositivo allo studio medico.
- Andate sulla **Community** o sulla **Cronologia di Utilizzo**.
- **Cliccate sull'icona (+)** situata nell'angolo in alto a destra e **scegliete QR code**.
- Per ciascun dispositivo **individuate e scansionate** il **QR code** sull'etichetta della confezione. Riceverete una notifica sul portale di una scansione effettuata con successo ma non vedrete ancora il dispositivo.
- Quando il paziente si registrerà e conterà il proprio dispositivo, lo studio medico sarà automaticamente connesso.

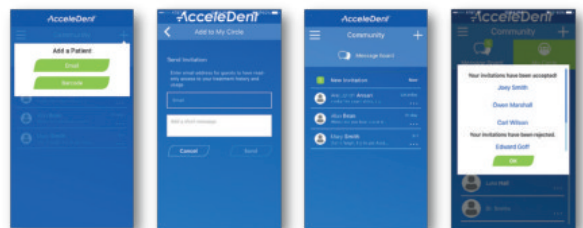

Nota: Se il paziente non si fosse ancora registrato, l'invito resterà nel sistema in attesa che il paziente effettui il set up dell'account.

2. Il medico si può connettere con i suoi pazienti attraverso la app o il portale web inviando un link via email.
  - Andate sulla **Community** o sulla **Library**.
  - Cliccate sull'icona (+) nell'angolo in alto a destra, e **digitate su email**.
  - Inserite l'email del paziente e cliccate invio.
  - Riceverete una notifica quando il paziente vi avrà aggiunto.

## Informazioni sul paziente


Non avrete solamente i dati di utilizzo nel dashboard dei vostri pazienti, ma anche informazioni di base sui pazienti in diverse modalità.

- L'icona **Informazioni (i)** mostrerà informazioni di base, così come il **link per i messaggi** o l'**archivio dei pazienti**.
- Quando siete nella pagina della Community, l'icona Informazioni (i) mostrerà nuovamente le informazioni di base e il link per tornare sulla **cronologia di utilizzo dei pazienti**.




## Monitoraggio del progresso dei pazienti

- Cliccando su un singolo paziente, per prima cosa vedrete il suo utilizzo complessivo degli ultimi 30 giorni.
- Il **Ranking Globale** è dato dal singolo utilizzo del paziente paragonato con l'utilizzo di TUTTI I pazienti AcceleDent nel mondo.
- Scendendo nella pagina sarà possibile vedere maggiori dettagli: giorni di utilizzo corretto, utilizzo eccessivo e sessioni saltate negli ultimi 30 giorni.
- Verde indica "buono", arancione indica "utilizzo eccessivo", rosso indica sessioni "saltate".
- Questo dashboard indicherà anche in che momento della giornata i vostri pazienti utilizzano AcceleDent: "blu chiaro" indica la mattina, "blu" indica il giorno e "blu scuro" indica la notte.

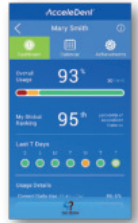

## Calendario sul progresso del paziente


- Se cliccate su **Calendario** verrà mostrato l'intero mese.
- Quando selezionate un determinato giorno otterrete maggiori informazioni sul momento della giornata nel quale il paziente utilizza AcceleDent.

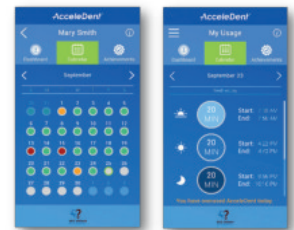

## Community per domande cliniche

È disponibile una funzione di messaggistica istantanea con i vostri pazienti AcceleDent per inviare incoraggiamenti, reminder sul trattamento, e qualunque altra informazione che riterrete importante.

- Utilizzate la **Community** per inviare messaggi ai pazienti **scrivendo il nome del paziente** e digitando un messaggio.
- Per i pazienti che stanno facendo un ottimo lavoro, non esitate ad inviare loro le congratulazioni.
- Per i pazienti che stanno facendo fatica a ricordarsi di usare AcceleDent, incoraggiateli con dei messaggi attraverso la App.
- I pazienti possono anche comunicare direttamente con il proprio medico e sentirsi più "connessi" con il team che segue il loro trattamento tra un appuntamento e l'altro.

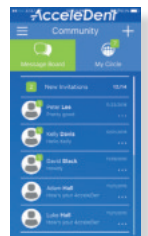

## Supporto

Nel Menu supporto potrete trovare **informazioni utili** sul Vostro **Account ID**, su come impostare le notifiche così come **video e istruzioni**. Potrete anche scegliere un **fuso orario** e una **lingua** diversa.

