


7 Ihre Erfolge

In der Ansicht (Erfolge) können Sie sehen, wie viele Auszeichnungen Sie gewonnen haben und welche noch nicht freigeschaltet sind. Die vollständige Liste aller Auszeichnungen finden Sie auf der Website AcceleDent.eu.



8 Einstellen einer Erinnerung

Zur Erstellung einer täglichen Erinnerung in Ihrer AcceleDent App klicken Sie auf den Button „Support“ und tippen Sie auf Benachrichtigungen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Erinnerungsmeldungen freigeschaltet sind und wählen Sie die bevorzugte Zeit, wann Sie an Ihre Behandlung erinnert werden möchten, um eine Push-Benachrichtigung zu erhalten, auch wenn Ihre App geschlossen ist.

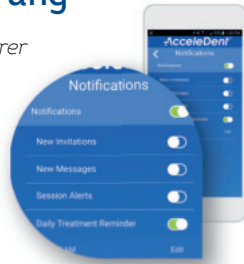

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den
AcceleDent Kundenservice:

KONTAKT DEUTSCHLAND UND DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER

Tel. +49-800-724-4532

oder besuchen Sie unsere Website acceleddent.eu

*Vielen Dank für Ihr Vertrauen
in AcceleDent –
Ihren zuverlässigen Begleiter*



Leader in Accelerated Orthodontics®

AcceleDent® Optima ist ein Medizinprodukt der Klasse II b, das für den unterstützenden Einsatz während einer kieferorthopädischen Behandlung bestimmt ist. Dieses Produkt darf ausschließlich von zugelassenen Ärzten verordnet werden. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für AcceleDent Optima, sowie Warnungen und Hinweise auf der Website acceleddent.eu, bevor Sie dieses Produkt anwenden. Eingeschränkter Anwendungshinweis: Nur für einen Patienten verwenden.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Android™, Android Market™ und Google Play™ sind Marken der Google Inc. in den USA und anderen Ländern. Apple® und Apple App Store® sind eingetragene Marke der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. OrthoAccel ist ein unabhängiger Hersteller und wurde durch Apple Inc. oder Google Inc. nicht bevollmächtigt, gesponsert oder in anderer Weise unterstützt. OrthoAccel®, AcceleDent® und SoftPulse Technology® sind eingetragene Marken und Optima™ ist eine Marke der OrthoAccel Technologies, Inc.

P_B_AppGuide_DE_1.1

©2017 OrthoAccel® Technologies, Inc.

AcceleDent®



Die ersten Schritte mit Ihrer **AcceleDent®** App

Verknüpfen Sie die AcceleDent App über Bluetooth® mit Ihrem AcceleDent Optima™, um Ihren Therapieerfolg zu optimieren.

- Kontrollieren Sie Ihren Behandlungsverlauf, einfach und individuell
- Greifen Sie auf die cloudbasierten Daten von unterschiedlichen Geräten zu, egal von wo
- Programmieren Sie sich Ihren individuellen Timer, der Sie an Ihre Behandlung mit AcceleDent erinnert
- Sichern Sie Ihre personenbezogenen Informationen mit einer HIPAA-kompatiblen Verschlüsselung.

1 Herunterladen

Die AcceleDent App ist ganz einfach zu installieren:

- **Android™ Geräte:** Suchen Sie im Android Market oder bei Google Play™ nach der AcceleDent App.
- **Apple® Geräte:** Suchen Sie im Apple App Store® nach der AcceleDent App.
- Zum Herunterladen der App folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers Ihres Gerätes.



2 Anmeldung

- Öffnen Sie die App, tippen Sie auf „Registrieren“ und beginnen Sie mit der Anmeldung.
- Tragen Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen (Terms of Use). Ihre E-Mail-Adresse wird als Ihr Benutzername verwendet.
- Geben Sie Ihre Profilinformationen und das Start-Datum Ihrer AcceleDent Behandlungen ein.
- Diese Daten werden zur Berechnung Ihres Ratings und Ihrer Erfolge verwendet.
- Bestätigen Sie Ihre Anmeldung.



3 Verbindung Ihres Aktivators

Durch die Verbindung Ihres Aktivators wird die AcceleDent Garantie aktiviert und alle nützlichen Funktionen der App freigeschaltet.


- Erlauben Sie der App, auf die Kamera in Ihrem Gerät zum Scannen des größeren 2D Barcodes auf der AcceleDent Verpackung zuzugreifen.
- Legen Sie Ihren Aktivator in den Ladebehälter ein. Achten Sie auf die orangefarbene LED und halten Sie ihn während des Vorgangs in der Nähe des mobilen Endgerätes.



4 Kontakt mit Ihrer Community

In Ihrer Community können Sie Benachrichtigungen erhalten und mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Ihr Netzwerk kann Sie motivieren und Ihnen helfen, die besten Behandlungsergebnisse zu erzielen.

- Fügen Sie durch Tippen auf den Button „Community“ Mitglieder (Observer) in Ihre Community hinzu. Sie, Ihr Arzt und andere Mitglieder können über die App Kontaktanfragen und Benachrichtigungen verschicken.
- Auch Ihre Familienmitglieder und Freunde können sich in der Community anmelden und zu deren Mitgliedern werden. Anschließend können sie sich Ihre Berichte und Erfolge ansehen sowie gegenseitig Mitteilungen versenden.

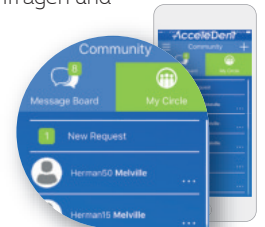

5 Ihr Timer

- Gehen Sie ins Hauptmenü (drei horizontale Leisten in der oberen linken Ecke) und tippen Sie auf „Mein AcceleDent“.
- Der Timer startet automatisch, nachdem Sie Ihren Aktivator verbunden und den Startknopf gedrückt haben. Sie können Ihre Behandlung durch erneutes Drücken des Startknopfes unterbrechen.



6 Ihre Übersicht-Ansicht

- Im „Nutzungsverlauf“ des Hauptmenüs können Sie Ihre gesamte Behandlungsleistung ansehen, die Ihren persönlichen Fortschritt zur Erreichung Ihres Zieles verdeutlicht. Nutzen Sie AcceleDent Optima 20 Minuten täglich und sehen Sie, wie Sie im Vergleich zu anderen Nutzern stehen.
- In der Kalenderansicht werden die Tage, an denen Sie AcceleDent Optima die empfohlenen 20 Minuten angewandt haben, grün, die Nutzung von mehr als 20 Minuten – orangefarben und weniger als 20 Minuten – rot angezeigt.
- Tippen Sie auf einzelne Tage, um Informationen zu Ihrer Behandlungszeit mit AcceleDent Optima zu bekommen.
- Beim Tippen auf das Informationssymbol, das sich auf jeder App-Seite befindet, erfahren Sie, wann die letzte Behandlung und die letzte Synchronisierung mit der AcceleDent App stattgefunden hat.

