

7 Ve a sus logros

En la pantalla "Logros", verá los premios que ha ganado y los premios que están pendientes de desbloquear. Vaya a AcceleDent.eu para ver una lista completa de premios disponibles.

8 Establecer su recordatorio

Para establecer un recordatorio diario en su aplicación AcceleDent, vaya a la pestaña "Ayuda" y pulse en "Notificaciones". Asegúrese de que sus notificaciones estén activadas y seleccione el momento de recordatorio de tratamiento preferido. A continuación, recibirá una notificación cada día a esa hora, incluso si su aplicación está cerrada.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio al cliente de AcceleDent:

PREGUNTAS EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE HABLA HISPANA:

Llame al +34 900 839096
o visite acceleddent.eu

*Gracias por confiar en
AcceleDent para ayudarle en su
rápido tratamiento de ortodoncia.*



Leader in Accelerated Orthodontics®

AcceleDent® Optima™ es un accesorio de ortodoncia destinado al uso durante el tratamiento de ortodoncia. Consulte las instrucciones de uso de AcceleDent Optima o acceleddent.com para ver advertencias y precauciones antes de usar el producto. La ley Federal (EE.UU.) prohíbe el uso del dispositivo sin receta médica. Rx uso para un solo paciente.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Android™, Android Market™ y Google Play™ son marcas registradas de Google Inc. en los EE.UU. y otros países. Apple® y Apple App Store® son marcas registradas de Apple Inc. en los EE.UU. y otros países. OrthoAccel es un fabricante independiente y no ha sido autorizado, patrocinado ni aprobado por Apple Inc. o Google Inc. OrthoAccel®, AcceleDent® y SoftPulse Technology® son marcas registradas y Optima™ es una marca registrada de OrthoAccel Technologies, Inc.

©2017 OrthoAccel® Technologies, Inc.

P_B_AppGuide_ES_1.0

AcceleDent®

Introducción a la aplicación AcceleDent®

La aplicación AcceleDent funciona conectándose a su AcceleDent Optima™ a través de Bluetooth®. La sincronización desbloquea estupendas funciones para optimizar la experiencia de su tratamiento.

- Controle el uso y los parámetros clave con paneles de control fácilmente accesibles
- Acceda a los datos en la nube desde múltiples lugares y dispositivos siempre que lo necesite.
- Programe avisos recordatorios diarios para garantizar el correcto uso del dispositivo
- Seguridad de la información personal con la encriptación compatible HIPAA

1 Descargar

Para instalar gratis la aplicación AcceleDent, siga estos simples pasos:

- **Dispositivo Android™:** Busque la aplicación AcceleDent en Android Market o Google Play™ Store.
- **Dispositivo Apple®:** Busque la aplicación AcceleDent en Apple App Store®.
- Siga los pasos específicos recomendados por el fabricante del dispositivo para descargar la aplicación.



2 Registrarse

- Abra la aplicación e inicie el registro pulsando en "Registro".
- Escriba su nombre y dirección de email y acepte los términos de uso. Desde ahora su email se usará como nombre de usuario.
- Introduzca la información de perfil incluyendo su fecha de inicio de AcceleDent. Esta fecha se usará para calcular su posición en el ranking y sus logros.
- La fecha de inicio del tratamiento de ortodoncia la establece su médico o si no, cuando recibió su aparato de ortodoncia (alineadores o brackets).
- Confirme su registro.



3 Sincronice su activador

Con la sincronización da comienzo el periodo de garantía de AcceleDent y desbloquea todas las funcionalidades de la aplicación para optimizar su experiencia de tratamiento.


- Permita el acceso de la aplicación a la cámara de su dispositivo para escanear el código de barras 2D en la caja de AcceleDent.
- Coloque su activador en la caja de carga, observe el LED naranja y téngalo a la vista durante el escaneo



4 Conecte con su comunidad


Dentro de la comunidad, puede recibir mensajes y hacer un seguimiento de sus amigos. El refuerzo positivo de su red de contactos puede motivarle para alcanzar excelentes metas de uso.

- Agregue observadores pulsando la pestaña "Comunidad" en el menú de su aplicación. Usted, su médico y los observadores pueden enviar y aceptar invitaciones para conectarse y enviar mensajes a través de la aplicación.
- La familia y los amigos también pueden registrarse para convertirse en observadores y obtener permiso para ver informes del panel, logros y enviar mensajes de ánimo desde la función de mensajería.

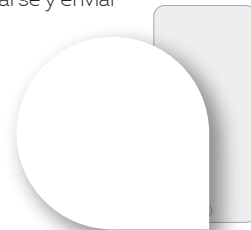

5 Utilice su temporizador

- Vaya al menú principal (las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda) y pulse "Mi AcceleDent".
- El temporizador se inicia automáticamente cuando haya sincronizado su activador y pulsado el botón de inicio. Su sesión también puede estar pausada, y sólo verá un Pause Timer.

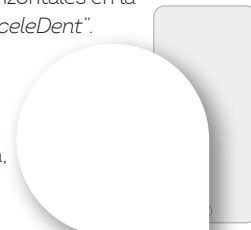

6 Ver su panel

- Desde el "Historial de Uso" en el Menú Principal podrá ver su porcentaje de uso general, que es su propio progreso hacia el objetivo de sesiones diarias de 20 minutos, su posición global comparado con todos los demás pacientes que están usando AcceleDent y más.
- En la vista Calendario, verá un círculo verde en los días que utilizó AcceleDent Optima durante los 20 minutos recomendados, naranja para días con más de 20 minutos, y rojo para días con menos de 20 minutos de uso.
- Pulse en cada día para ver a qué hora del día ha realizado la sesión de tratamiento.
- El icono de información en cada página también puede utilizarse como un recordatorio de cuándo realizó su último uso y sincronización con la aplicación AcceleDent.

