

7 Visualizzazione dei vostri risultati

Nella schermata sui risultati, vengono visualizzati i premi conseguiti e quelli ancora da ottenere. Visitate AcceleDent.eu per l'elenco completo dei premi disponibili.

8 Impostazione dei vostri promemoria

Per configurare un promemoria giornaliero nell'App AcceleDent, andate sull'opzione "Assistenza" e selezionate le notifiche.

Accertatevi che le notifiche siano attive e selezionate l'orario desiderato per il promemoria del trattamento. A quel punto riceverete una notifica push ogni giorno all'orario impostato, anche se l'App fosse chiusa.

AcceleDent®

In caso di eventuali domande, contattate il servizio di **customer service AcceleDent**:

PER L'ITALIA CHIAMARE IL NUMERO

+39 800 596833

o visitare il sito accedent.eu

*Grazie per la fiducia riposta in
AcceleDent come partner per il
vostro percorso ortodontico
accelerato.*



Leader in Accelerated Orthodontics®

AcceleDent® Optima™ è un dispositivo ortodontico destinato all'utilizzo durante la terapia ortodontica. Consultate le istruzioni per l'uso fornite con AcceleDent Optima o accedent.com per avere suggerimenti e precauzioni per l'uso prima di utilizzare questo prodotto. La legge federale (statunitense) limita la vendita del presente dispositivo ai medici autorizzati e comunque su loro prescrizione. L'impiego è consentito per singolo paziente solo su prescrizione medica.

Bluetooth® è un marchio commerciale registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Android™, Android Market™ e Google Play™ sono marchi commerciali di Google Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple® e Apple Store® sono marchi commerciali registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. OrthoAccel è un produttore indipendente e non è stato autorizzato, finanziato o altrimenti approvato da Apple Inc. o Google Inc. OrthoAccel®, AcceleDent® e SoftPulse Technology® sono marchi commerciali registrati e Optima™ è un marchio commerciale di OrthoAccel Technologies, Inc.

P_B_AppGuide_IT_1.0

©2017 OrthoAccel® Technologies, Inc.

Guida introduttiva all'App AcceleDent®

L'App AcceleDent funziona grazie al collegamento Bluetooth® di AcceleDent Optima™.

L'abbinamento consente di ottenere notevoli funzionalità per ottimizzare l'esperienza terapeutica.

- Monitoraggio sull'utilizzo del dispositivo e dei suoi parametri chiave attraverso pannelli di controllo facilmente accessibili.
- Accesso ai dati cloud da diverse postazioni e periferiche on demand.
- Programmazione delle notifiche giornaliere per assicurare l'utilizzo secondo le tempistiche corrette.
- Salvataggio delle informazioni personali con crittografia conforme allo standard HIPAA

1 Download

Per installare l'App gratuita AcceleDent, seguite i semplici passaggi riportati di seguito.

- **Dispositivi Android™:** Cercate l'App AcceleDent nell'Android Market o in Google Play™ Store.
- **Dispositivi Apple®:** Cercate l'App AcceleDent nell'Apple Store®.
- Seguite i passaggi specifici suggeriti dal produttore del vostro dispositivo per eseguire il download dell'App.



2 Registrazione

- Aprite l'App ed iniziate la registrazione selezionando "Registrati".
- Immettete il nome e l'indirizzo e-mail ed accettate le condizioni d'uso. L'email che fornirete sarà in seguito utilizzata come nome utente.
- Digitate le informazioni del profilo compresa la data d'inizio di utilizzo di AcceleDent. Questa data sarà utilizzata per calcolare la vostra classifica e i risultati raggiunti nel pannello di controllo.
- La data d'inizio della terapia ortodontica potrà essere assegnata dal vostro medico competente, o ugualmente, nel momento in cui ricevete il dispositivo ortodontico (allineatori o archi ortodontici)
- Confermate la registrazione.



3 Abbinamento del dispositivo

La garanzia di AcceleDent ha validità a partire dall'abbinamento del dispositivo, abilitando tutte le funzionalità dell'App per ottimizzare l'esperienza terapeutica.

- Consentite all'App di utilizzare la video-camera del dispositivo in dotazione per scansionare il codice a barre 2D più grande sulla confezione di AcceleDent.
- Disponete l'attivatore nel supporto di ricarica, osservate il LED arancione e tenetelo vicino durante la scansione.



4 Connessione alla vostra community


All'interno della community, è possibile ricevere i messaggi e tenere traccia degli amici. Il supporto positivo offerto dalla propria rete può fornire la motivazione necessaria per raggiungere eccellenti obiettivi.

- Aggiungete gli osservatori selezionando la scheda della "Comunità" nel menu dell'App. L'utilizzatore, il medico competente e gli altri osservatori possono inviare ed accettare gli inviti, connettersi ed inviare messaggi attraverso l'App.
- Anche la famiglia e gli amici possono effettuare la registrazione per diventare osservatori ed ottenere l'autorizzazione per visualizzare i report e i risultati nel pannello di controllo, inviando parole d'incoraggiamento attraverso la messaggistica.



5 Uso del timer

- Passate al menu principale (le tre barre orizzontali nell'angolo in alto a sinistra) e selezionate "My AcceleDent".
- Il timer si avvierà in modo automatico una volta abbinato l'attivatore in dotazione, selezionando il pulsante di avvio. È anche possibile sospendere la sessione, verrà visualizzato il timer relativo alla singola pausa.

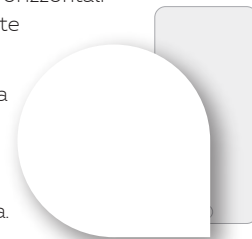

6 Visualizzazione del vostro pannello

- Dalla "cronologia di utilizzo" nel menu principale, è possibile visualizzare la percentuale di utilizzo complessiva, che rappresenta il vostro personale progresso verso l'obiettivo delle sessioni giornaliere di 20 minuti, la classifica rispetto a tutti gli altri pazienti AcceleDent e molto altro ancora.
- Nel vostro calendario visualizzerete un cerchietto verde nei giorni di utilizzo di AcceleDent Optima per i 20 minuti consigliati, arancione per le applicazioni oltre i 20 minuti e rosso per i giorni con un impiego inferiore ai 20 minuti.
- Selezionate ciascun giorno per visualizzare l'orario in cui avete svolto le sessioni di trattamento.
- L'icona informativa situata in ogni pagina è accessibile in modo rapido, come ad esempio il reminder sull'ultimo utilizzo e l'ultima sincronizzazione con l'App AcceleDent.

