

7 Regarder vos résultats

Sur l'écran « Accomplissements », vous visualiserez le niveau de récompense atteint et ceux que vous pouvez atteindre. Allez sur AcceleDent.eu pour avoir la liste complète des récompenses.

8 Régler vos Alertes

Pour régler un rappel quotidien dans votre application *AcceleDent*, naviguez jusqu'à l'onglet « Assistance » et tapez sur « Notifications ». Assurez-vous que vos notifications soient activées et sélectionnez l'heure de rappel préférée pour votre traitement. Vous recevrez ensuite une notification directe tous les jours à l'heure choisie, même si votre application est fermée.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service client d'AcceleDent :

CONTACT EN FRANCE ET POUR LES PAYS FRANCOPHONES

Appelez le +33 8 05 08 00 86
ou allez sur acceleDent.eu

*Merci d'avoir fait confiance à
AcceleDent pour être votre partenaire
durant votre voyage en Orthodontie
Accélérée.*



Leader in Accelerated Orthodontics®

Bluetooth® est une marque commerciale déposée appartenant à la société Bluetooth SIG, Inc. Android™, Android Market™ et Google Play™ sont des marques commerciales de la société Google Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple® et Apple App Store® sont des marques commerciales déposées de la société Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. OrthoAccel est un fabricant indépendant et n'a pas été autorisé, sponsorisé ni reçu l'approbation par ailleurs par Apple Inc. ou Google Inc. OrthoAccel®, AcceleDent® et SoftPulse Technology® sont des marques commerciales déposées et Optima™ est une marque déposée de la société OrthoAccel Technologies, Inc.

©2017 OrthoAccel® Technologies, Inc.

Restez C applic

L'application Ac
votre AcceleDe
La connexion de
pour optimiser t

- Gardez la tra
à l'aide de tab
- Accédez en p
sur le cloud d
- Programmez
assurer d'une
- Sécurisez vos
conforme à l'H

1 Télécharger


Pour installer l'application gratuite AcceleDent, suivez des simples étapes :

- **Appareil Android™** : cherchez l'application AcceleDent dans Android Market ou Google Play™ Store.
- **Appareil Apple®** : cherchez l'application AcceleDent dans l'Apple App Store®.
- Suivez les étapes recommandées par le fabricant de votre appareil pour télécharger l'appli.



2 S'enregistrer

- Ouvrez l'appli et enregistrez vous en tapant sur « s'Inscrire ».
- Entrez votre nom et adresse e-mail et acceptez les conditions d'utilisation. Votre e-mail vous servira de nom d'utilisateur à partir de maintenant.
- Entrez des informations relatives à votre profil y compris la date du début de l'utilisation d'AcceleDent. Cette date sera utilisée comme date de référence pour tous les calculs des tableaux de bord.
- La date de début du traitement orthodontique peut vous être donnée par votre médecin ou correspond au jour où vous avez reçu votre dispositif orthodontique (gouttières, bagues).
- Un mail vous a été envoyé, cliquer sur le lien pour confirmer votre enregistrement, puis -) - 0.

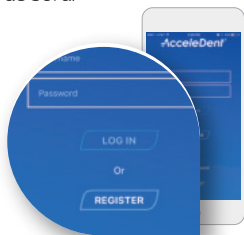

3 Synchroniser votre activateur

La synchronisation initiera votre garantie AcceleDent et débloquera toutes les fonctionnalités essentielles que possède l'application, pour optimiser votre expérience en matière de traitement.

- Permettez à l'application d'utiliser la caméra de votre appareil pour scanner le grand code barre 2D situé sur l'emballage d'AcceleDent.
- Placez votre activateur dans le boîtier de chargement, observez la LED orange et gardez-le tout près pendant le scan.



4 Connectez-vous à votre communauté


Au sein votre communauté, vous pouvez recevoir des messages et garder une trace de vos amis. Un soutien positif de vos amis peut être une motivation supplémentaire pour atteindre d'excellents niveaux d'utilisation.

- Ajoutez des observateurs en tapant sur l'onglet « Communauté » dans le menu de votre application. Vous, votre médecin et d'autres membres de votre famille pourront envoyer et accepter des invitations à se connecter et des messages via l'application.
- Votre famille et vos amis pourront aussi s'enregistrer pour devenir des observateurs et recevoir la permission de voir les rapports et tableau de bord, les accomplissements et vous envoyer des messages d'encouragement à partir de la fonctionnalité messagerie.



5 Utiliser votre minuterie

- Allez dans le menu principal (les trois barres horizontales dans le coin en haut à gauche) et tapez Mon compte AcceleDent.
- La minuterie démarre automatiquement, une fois que vous avez synchronisé votre activateur et appuyé sur le bouton pour démarrer. Vous avez aussi la possibilité de faire une pause dans votre séance et, seule une minuterie pause sera visible.

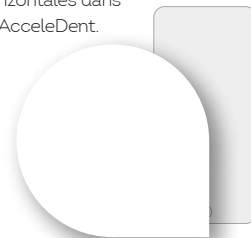

6 Regarder votre tableau de bord

- À partir de « l'historique d'utilisation » dans le menu principal, vous serez capable de voir votre pourcentage global d'utilisation. Il représente vos progrès en matière de réalisation de l'objectif de séance d'utilisation de 20 minutes par jour. Vous aurez accès à votre rang mondial comparé à tous les autres patients utilisateurs d'AcceleDent.
- Sur le calendrier, vous verrez un cercle vert pour les jours où vous avez utilisé AcceleDent Optima pendant les 20 minutes recommandées, orange pour les jours comptant plus de 20 minutes et rouge pour les jours comptant moins de 20 minutes d'utilisation.
- Tapez tous les jours pour voir à quelle heure de la journée votre séance de traitement a eu lieu.
- L'icône informative située sur chaque page peut aussi être accessible rapidement et servir de rappel du moment où a eu lieu votre dernière utilisation et se synchroniser avec l'application AcceleDent.

